

Desinfektion des Touchscreen Mic bei Wechsel der Lehrkraft

Stand: 01.01.2022

Das Touchscreen Mic kann mit den angegebenen Desinfektionsmitteln anhand der Phonak Leitlinie desinfiziert werden. Bitte beachten Sie dabei, dass keine Flüssigkeit in die Mikrofonöffnungen auf der Vorderseite des Geräts eindringt. Desinfektionsmittel dürfen nicht direkt auf das Touchscreen Mic gesprüht werden. Verwenden Sie immer ein Einwegtuch zur Benetzung mit dem Desinfektionsmittel. Nach Beendigung der Desinfektion müssen die Desinfektionsmittelreste abgewischt werden.


Das Umhängeband des Touchscreen Mic lässt sich leicht austauschen, und ist jetzt wieder verfügbar. Alternativ kann der Gürtelclip für das Touchscreen Mic zusammen mit einem beliebigen Umhängeband verwendet werden. Das Touchscreen Mic mit dem Gürtelclip wird dann einfach in das Band eingehängt.



Flächendesinfektionsmittel **egger cedis Profi SURFACE 2**

500 ml Sprühflasche

14,80 € incl. MwSt. zzgl. Versandkosten

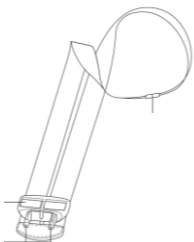

Phonak Umhängeband für Touchscreen Mic


15,60 € incl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Die preisgünstige Alternative



Phonak Gürtelclip für Touchscreen Mic

6,50 € incl. MwSt. zzgl. Versandkosten

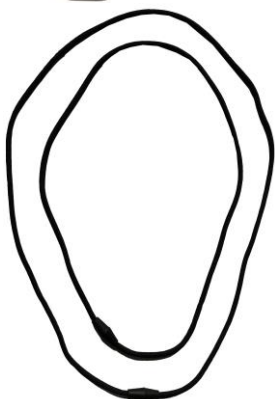

Einfaches Umhängeband als Set in zwei Längen mit Schnappverschluss zur Verwendung mit dem Gürtelclip

3,90 € incl. MwSt. zzgl. Versandkosten